

DR.CYJ

HAIR FILLER

Cheveux denses, sains, éclatants




L'incontournable complexe peptidique pour des traitements performants

4 fois primé au **Pearl of Aesthetic Dermatology** par plus de 20 000 Médecins.

Agit sur les mécanismes impliqués dans la chute et repousse des cheveux.
Reconstruit et revitalise le cuir chevelu. Traite les alopécies non cicatricielles.

CE
2265

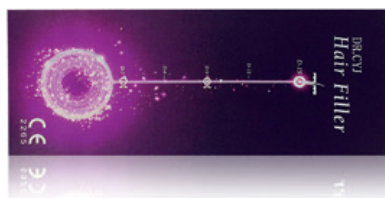


Capactuel
MEDICAL

Esthétique préventive et réparatrice

DR.CYJ
HAIR FILLER
Hair cell and scalp revitalization

DR CYJ HAIR FILLER - Le 1er Filler capillaire au monde.
Complexe peptidique innovant
pour la repousse des cheveux, la reconstruction du cuir chevelu.

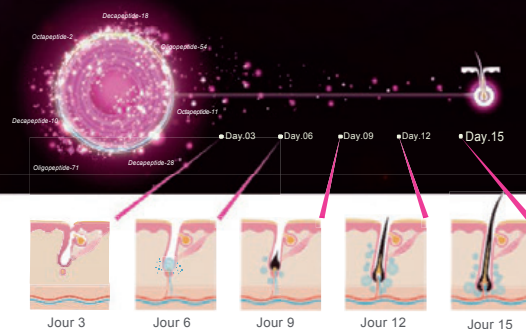

DR.CYJ Hair Filler

Capactuel
MEDICAL
Preventive and Restorative Aesthetic

DR.CYJ Hair Filler Cocktail

20-22, rue Richer - 75009 Paris - France - info@capactuel.com

www.capactuel.com

Application

- ✓ Patients avec alopecie non-cicatricielle .
- ✓ Homme et femme qui ont des cheveux clairsemés.
- ✓ Receveurs de greffe de cheveux qui veulent augmenter le taux de survie.
- ✓ Patients victimes d'alopecie qui veulent créer une synergie avec d'autres traitements (contre perte de cheveux ou pour repousse) .

Avantages

1. Complexe peptidique breveté et exclusif pour la repousse et la santé des cheveux.
2. Technologie à libération prolongée qui maximise l'efficacité des 7 peptides de croissance capillaire.
3. Applicable et efficace sur tout type d'alopecie non cicatricielle.
4. Cliniquement prouvé.

Instructions d'usage

Protocole

- 1) Désinfecter la zone à traiter
- 2) Injecter DR.CYJ Hair Filler sur la zone cible avec une multi-aiguille 32G30 (5 aiguilles de 3mm).

Traitement standard : 4 sessions espacées de 2 semaines

Traitement de consolidation : 3 sessions espacées de 1 mois

Post traitement (soin à domicile optionnel) : Appliquer quotidiennement le tonic HR3 Matrix.

Il est recommandé pour parfaire le traitement d'adjoindre à chaque session 10-20min de LED.

HYCOOX



HR³ MATRIX




Hair-GENTRON




GENO-LED



Principaux ingrédients actifs

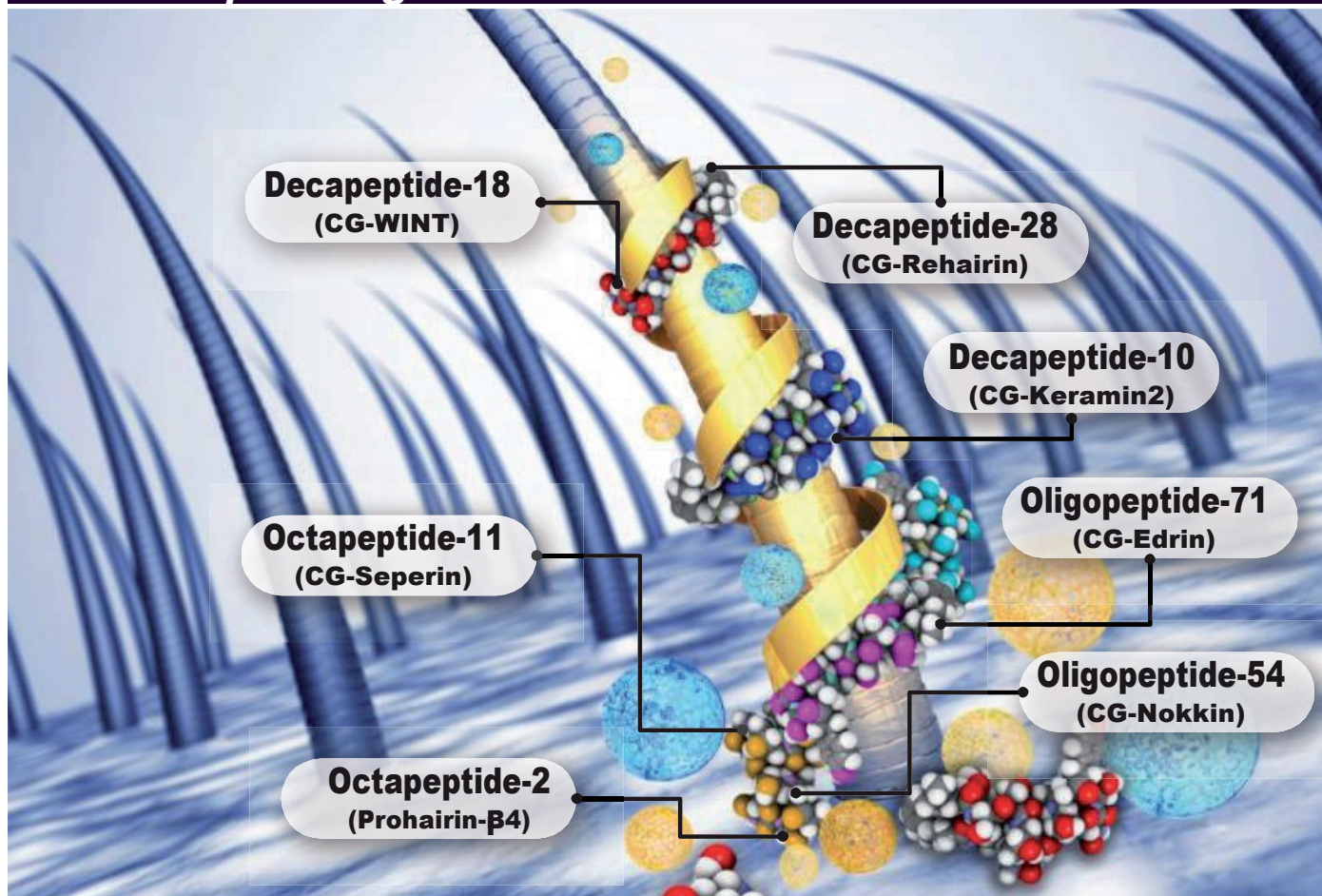

Mécanisme DR.CYJ Hair Filler

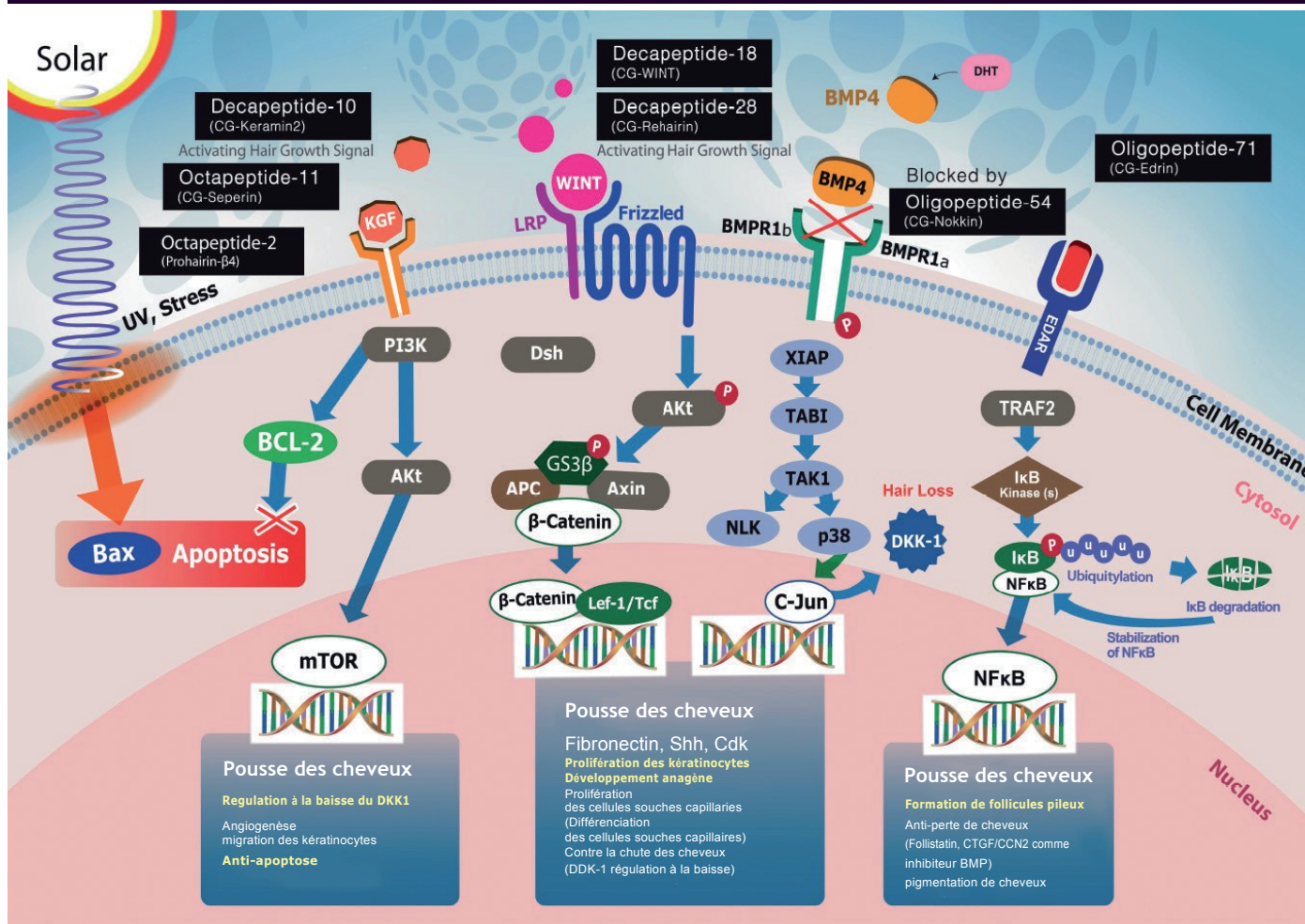


In-vitro Données des Tests

1. Emanation de gènes liés à la croissance des cheveux

Cellule : HHFDP p8 (Cellules de papille dermique de follicule de cheveux)


Temps de Culture : 24 H / Methode : analyse RT-PCR

Contrôle positif : Minoxidil 1ug/ml

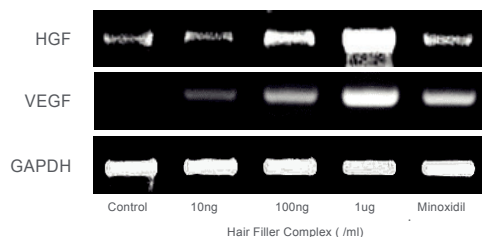

Emanation des facteurs de croissance liés à la croissance du follicule pileux par le Hair Filler Complex sur la cellule de papille dermique de follicule de cheveux

Nous avons observé que l'émanation de HGF et VEGF sont régulés par un traitement avec Hair Filler Complex. Hair Filler Complex favorise la croissance des cheveux grâce à un effet stimulant sur l'émanation des gènes HGF et VEGF dans HHFDPC.

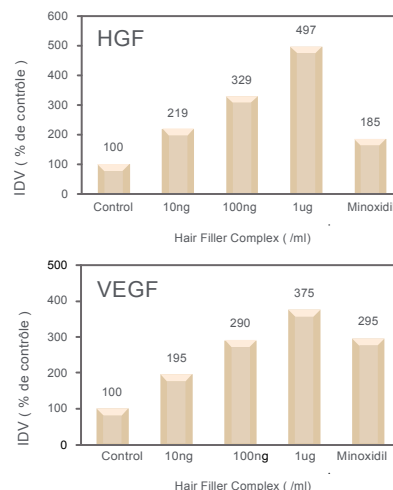


2. Emanation de protéines liées à la croissance des cheveux

Cellules : HHFDP p8 (Cellules de papille dermique de follicule de cheveux)

Temps de Culture : 24 H


Methode : Analyse de marquee Western

Contrôle positif : Minoxidil 1ug/ml

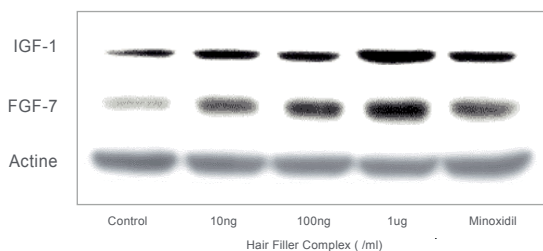

Emanation de facteurs de croissance liés à la croissance du follicule pileux par le Hair Filler Complex sur la cellule de papille dermique de follicule de cheveux

Hair Filler Complex favorise la croissance des cheveux grâce à un effet stimulant sur l'émanation des protéines IGF-1 et FGF-7 dans HHFDPC.

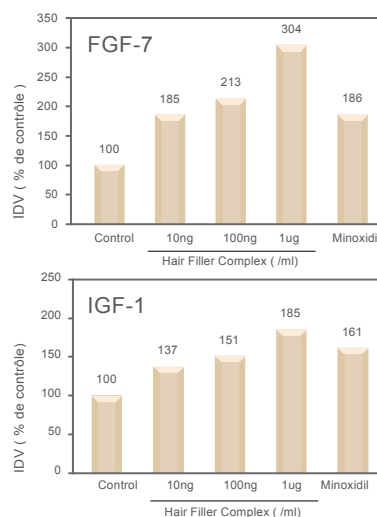

3. Inhibition de l'émanation génique liée à la perte de cheveux induite par la DHT

Cellules : HHFDP p8 (Cellules de papille dermique de follicule de cheveux)

Temps de Culture : 24 H


Methode : Analyse RT-PCR

Contrôle positif : Minoxidil 1ug/ml

Stimulateur : DHT 5ug/ml

Inhibition de l'émanation des gènes liés à la perte de cheveux

Les émanations induites par la DHT des gènes liés à la perte de cheveux, DKK-1, IL-6 et TGF- β 1 ont été réduites par le traitement Hair Filler Complex.

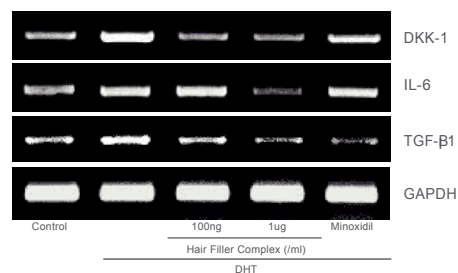

4. Inhibition de l'apoptose cellulaire induite par la DHT


Cellule : HHFDP p6 (Cellules de papille dermique de follicule de cheveux)

Temps de Culture : 3 jours

Methode : SRB staining


Contrôle Positif : Minoxidil 1ug/ml

Stimulateur : DHT 5ug/ml

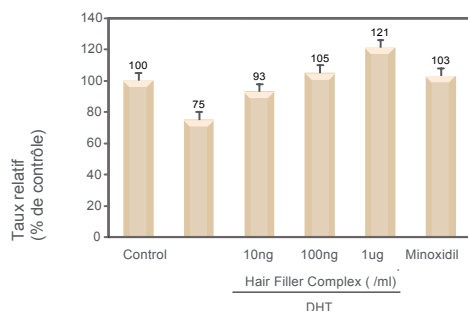

Test de croissance cellulaire après le traitement Hair Filler Complex sur la cellule papillaire dermique du follicule pileux

Hair Filler Complex inhibe l'apoptose des cellules induites par la DHT

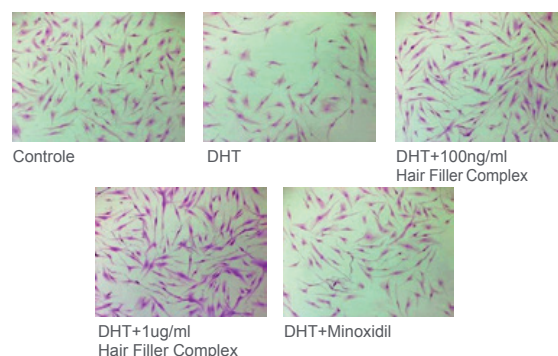

Étude clinique avant / après

1 session toutes les 2 sem. sur 8 sem. (4 sessions)

Densité total cheveux [1/cm²]

Cheveux épaisseur [mm]



Avant Après

CAS#01. Sex.M/Age: 46

Avant




Après 2 mois


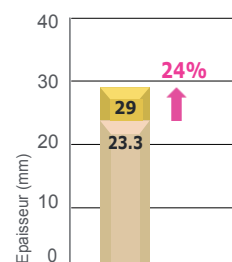
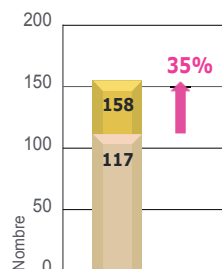


CAS#02. Sex.M/Age: 45

Avant

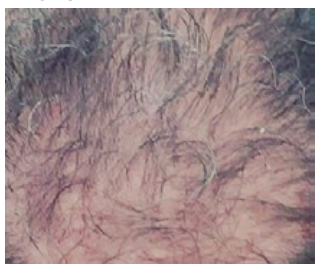

Après 2 mois

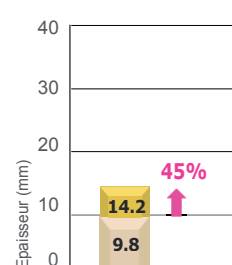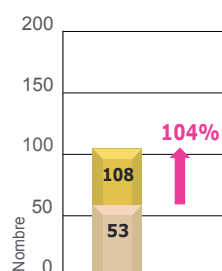
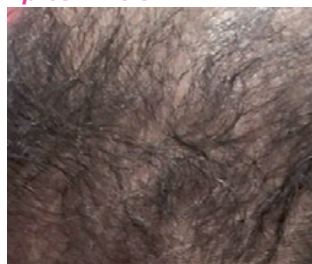


CAS#03. Sex.M/Age: 47

Avant



Après 2 mois


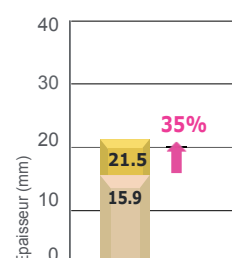
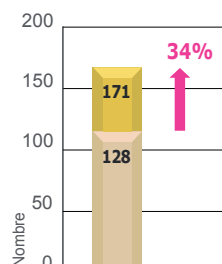


CAS#04. Sex.F/Age: 38

Avant



Après 2 mois

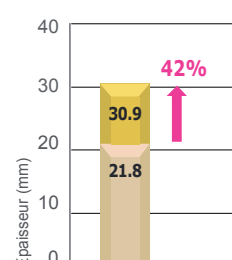
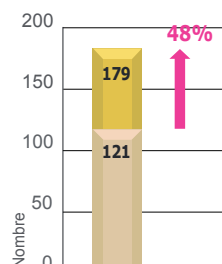
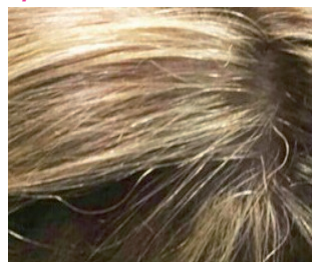


CAS#06. Sex.M/Age: 28

Avant



Après

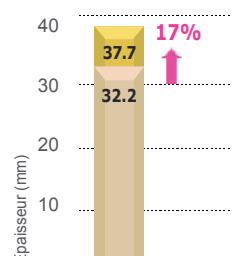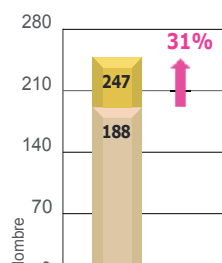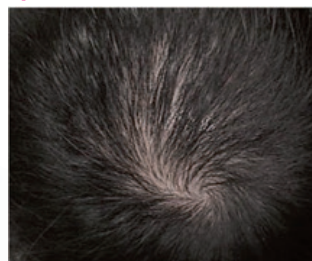

DR.CYJ
HAIR FILLER
Hair cell and scalp revitalization

Capactuel
MEDICAL
Esthétique préventive et réparatrice

33 +(0)1 85 34 31 37 - info@capactuel.com - www.capactuel.com



CAREGEN

[Published in June. 2017] © 2017 Caregen Co.,