

# NovaLiFT



## EMS + EMT + RF





3 technologies non invasives pour un Visage lifté, redessiné,  
une Peau plus ferme, élastique, lissée.

**Cap**actuel  
MEDICAL  
*Preventive and Restorative Aesthetic*

# NovaLiFT

## Un véritable changement de paradigme

NovaLiF-T est un appareil entièrement non invasif, sans aiguille, mains libres qui permet de traiter tout le visage en seulement 20 minutes pour un lifting, remodelage et une élimination rapide des rides du visage.

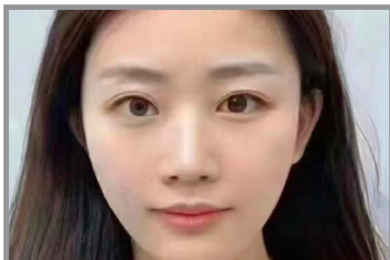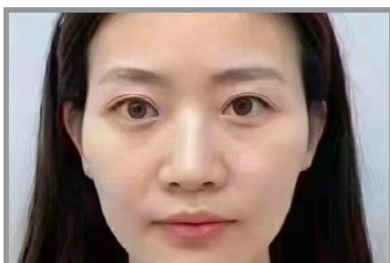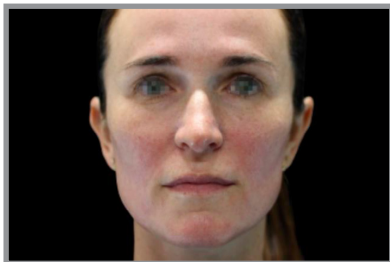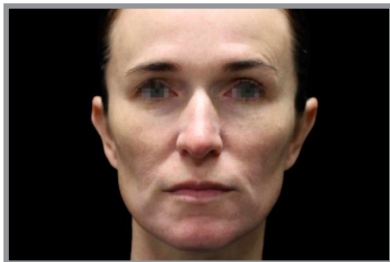

Dispositif innovant sur le marché, bien plus efficace, rapide et pratique que les solutions habituellement proposées (cosmétiques, injections, régimes amaigrissants, traitements faciaux traditionnel...), il s'attaque à l'ensemble des zones et signes du vieillissement du visage pour redonner jeunesse et confiance aux patients.

### → 3 technologies sur un même appareil

- HILFES (EMS : Stimulation électro-musculaire basse fréquence à haute intensité)
- HIFEM (EMT : Energie électromagnétique focalisé à haute intensité)
- PCRF (Radiofréquence)

### → 2 technologies combinées pour un visage remodelé

Les technologies HILFES et HIFEM synchronisées de manière innovante permettent un traitement simultané de la peau et des muscles du visage.

### → Des traitements simultanés grâce 5 applicateurs

La meilleure pratique consiste à traiter simultanément un patient avec 3 applicateurs (2 applicateurs pour les yeux et 1 applicateur pour le front ; 2 applicateurs pour les joues du visage et 1 applicateur pour le front), ou de traiter deux patients avec les 5 applicateurs.

### → Rapide, sûr, conviviale, facile à appliquer

La procédure de traitement du visage complet est complètement non invasive et ne dure que 20 minutes. Elle se déroule en continu et mains libres sans intervention du praticien une fois les applicateurs posés.

### → Réduction des rides 37%

### → Effet lifting 23%

### → Augmentation du tonus musculaire 30%

# Comment fonctionne NovaLif-T ?

Un traitement facial mécanique et thermique rajeunissant grâce à l'application de technologies complémentaires. (Front, contours des yeux, joues, zygomatiques majeures et mineures, muscles du risorius, mâchoire...).


La Technologie **HILFES (EMS)** basée sur une stimulation électro musculaire à haute intensité, déclenche des contractions sans effort dites « supra-maximales » impossibles à obtenir naturellement. Le processus naturel de contraction musculaire réalisé par votre cerveau via l'envoi de signaux électriques est ainsi reproduit et maîtrisé. En raison de la faible fréquence de stimulation, les contractions musculaires sont considérablement intensifiées car la phase de relaxation ne suit pas chaque stimulus. Adaptée au traitement des joues et du front cette technologie permet stimuler la production de collagène, améliorer l'élasticité de la peau, adoucir les rides, raffermir et redessiner les contours du visage.

Avec l'application simultanée de la technologie **HIFEM (EMT)** basée sur l'émission d'une énergie électromagnétique focalisée à haute intensité sur la partie basse du visage, les contractions obtenues sans impulsions électriques permettent de restaurer et améliorer le soutien du tissu facial en augmentant la densité et qualité de la structure musculaire de façon homogène et profonde.


Plus minces, les applicateurs **PCRF** qui fournissent une RF précise et constante sont conçus pour traiter des zones plus étroites et sensibles comme le contour des yeux. En stimulant et chauffant le derme, le niveau de fibres de collagène et d'élastine est augmenté, la peau devient plus ferme et tonique, ce qui réduit les rides et le relâchement cutané.

## Applicateurs et technologies proposées



1 Applicateur HILFES Front + 1 boîtier adaptateur de connexion à l'hôte

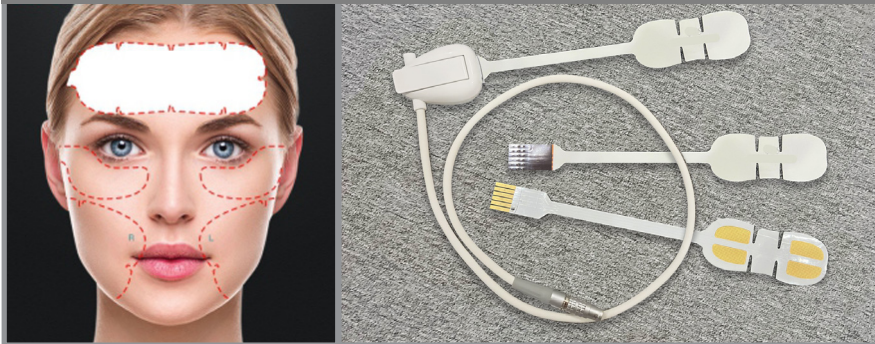

HILFES HIFEM

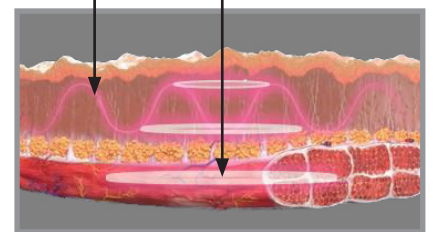

PCRF

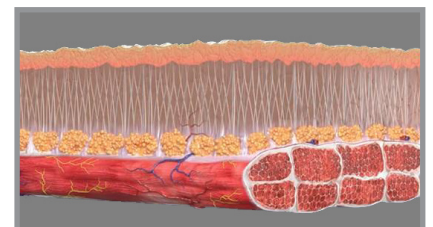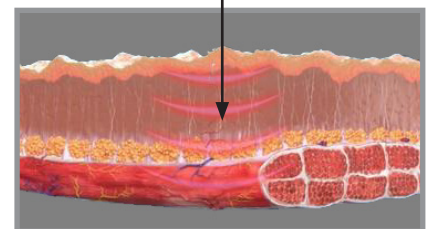

2 Applicateurs PCRF Yeux + 2 boîtiers adaptateurs de connexion à l'hôte




2 Applicateurs HILFES + HIFEM Visage ( connexion directe à l'hôte )



**Nouvelles fibres  
d'élastine et collagène.  
Augmentation  
du tonus musculaire.  
Peau plus ferme.  
Rides et poches réduites.**

# NovaLiFT

## Hôte et branchements des applicateurs

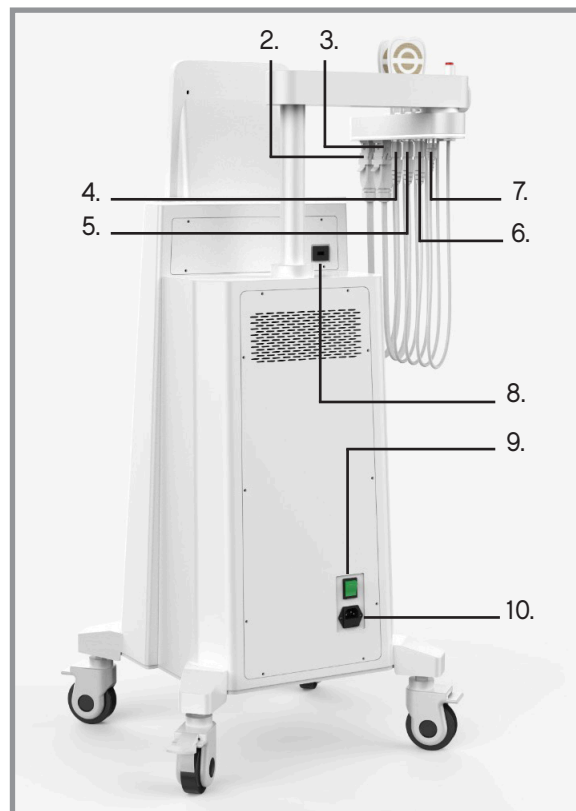

- [1]. Ecran d'affichage tactile interactif
- [2]. Prise de l'applicateur visage 1
- [3]. Prise de l'applicateur visage 2
- [4]. Prise d'adaptateur de l'applicateur œil 1
- [5]. Prise d'adaptateur de l'applicateur œil 2

- [6]. Prise d'adaptateur de l'applicateur front
- [7]. Prise de la Pièce à mains d'arrêt d'urgence
- [8]. Port USB
- [9]. L'interrupteur d'alimentation principal
- [10]. Prise du cordon d'alimentation

### Caractéristiques techniques :

Configuration	Hôte + 5 applicateurs + 3 adaptateurs
Ecran tactile	12.1 inches color touch screen
Technologie HILEFS ( EMS )	15 niveaux d'intensité
Technologie HIFEM ( EMT )	10 niveaux d'intensité
Technologie PCRF ( Radiofréquence )	5 niveaux d'intensité
Voltage	110V-240V 50HZ/60HZ
Puissance	550 VA
Emballage	57 X 72 X122 cm - 77 kgs